


コストパフォーマンスの良い ディスプレイ電極

MEDICOリードロック電極

MSGLT-08G,Solid

サイズ 45*42*1mm
 パット材質 フォーム
 粘着部 ソリッドゲル
 電極素子 Ag/AgCl
 用途 Stress, Monitoring
 価格 500個/箱(10袋入り) ¥25,000 ※

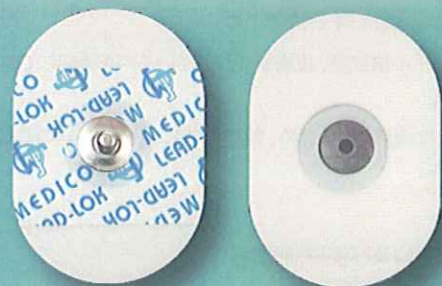

MSGLT-04,Solid

サイズ 50*35*1mm
 パット材質 フォーム
 粘着部 ソリッドゲル
 電極素子 Ag/AgCl
 用途 Stress, Monitoring
 価格 500個/箱(10袋入り) ¥20,000 ※

※消費税別途

販売名	MEDICOリードロック電極
入数	500個/箱 (50個/袋 10袋入り)
クラス	一般医療機器
届出番号	13B1X10035MLR001
禁忌・注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・再使用禁止 ・磁気共鳴画像診断装置 (MRI) と併用しないこと
その他	未滅菌

●販売元



有限会社アルコシステム

〒277-0005 千葉県柏市柏4-11-17 イワタビル
TEL 04-7169-7050 FAX 04-7169-1470

Mail: mail@arcosystem.co.jp http://www.arcosystem.co.jp

製造販売元：

株式会社メディカルタウン
東京都文京区本郷三丁目24-8
TEL 03-3816-1381 (代表)
FAX 03-3816-1390



MEDICO ELECTRODES INTERNATIONAL
An ISO 13485:2003 Company
www.Medicoleadlok.com

CE

MEDICOリードロック電極

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品は医師の監督のもとで使用し、アレルギー等の皮膚反応が認められた場合は即座に処置してください。
2. 傷口や炎症等がある皮膚には使用できません。
3. 磁気共鳴画像診断装置(MRI)と併用しないこと。
4. 本品は、新生児、及び幼児には使用できません。
5. 本品は粘着剤を使用しているため、過敏性皮膚の患者には使用できません。


【形状・構造及び原理等】

1. 概要

分極電圧が低く安定した銀/塩化銀電極と密着性の高い導電ゲルにより皮膚表面の電気信号を心電計に伝達する。

2. 形状及び寸法

写真はMSGLT-08Gを示す。

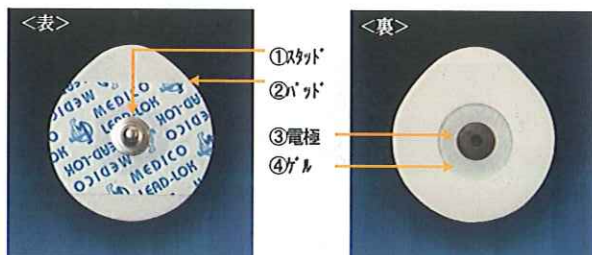

型式	パッドの寸法 (mm) 長さ x 幅 x 厚さ
*MSGLT-01G	57 x 38 x 1
MSGLT-01	57 x 38 x 1
MSGLT-03	50 x 48 x 1
MSGLT-03C	50 x 48 x 1
MSGLT-04	50 x 35 x 1
MSGLT-05	42 x 37 x 1
*MSGLT-05MG	40 x 36 x 1
MSGLT-06	44 x 32 x 1
*MSGLT-06M	44 x 28 x 1
MLGST-07	35 x 27 x 1
MSGLT-08	45 x 42 x 1
MSGLT-08G	45 x 42 x 1
MSGLT-08 RT	45 x 42 x 1
*MSGLT-08G RT	45 x 42 x 1
MSGLT-09	53 x 34 x 1
MSGLT-11	φ 40 x 1
MSGLT-33	φ 50 x 1

【使用目的、効能又は効果】

本品は、体表に設置し、体表の電気信号を処理装置(心臓の電気活動をグラフで表示する)に伝達する導体である。この電気活動を記録する一般的な装置は、心電計(ECG)である。本品は単回使用である。

【品目仕様】

〈特性・性能又は機能〉

仕様	備考
DC オフセット電圧 100 mV 以下	ANSI/AAMI EC12:2000 による
AC インピーダンス 2 kΩ 以下	
デフ・リカバリ 100 mV 以下	

【操作方法又は使用方法等】

1. 検査手順に従って電極の貼付部位を選択します。
2. 選択した貼付部位に傷口や炎症がないことを確認し、皮膚表面の汚れ、皮脂を清拭して乾燥します。
3. 本品の包装を開けて必要な個数を取り出します。
4. 粘着面に触れないように注意して裏面の保護フィルムを剥がし、貼付部位に本品を置きます。パッド部分を上からよくなぞって皮膚に密着させ、本品を固定します。中心部は強く押さないように注意してください。
5. 心電計のリード線を電極のスタッドに接続します。

【使用上の注意】

1. 本品に損傷又は異常を認めた場合は使用しないこと。
2. 本品を体毛の多い部位に使用する場合、必要に応じて剃毛を行って十分な粘着を得てください。
3. アルコール清拭後、皮膚が乾燥しているのを確認してからご使用ください。
4. 安定した波形を得るため、他の型式の電極と一緒に使用しないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〈貯蔵・保管方法〉

1. ゲルの乾燥を防ぐため、包装を開封した後は必ず密封して保管すること。
2. 直射日光・高温多湿を避け、水濡れに注意して、常温・常湿の室内に保管すること。また、衛生的な保管場所に保管すること。
3. 保管温度: 5℃~30℃

〈使用期限(耐用期間)〉

表示ラベルに記載(製造後約2年)[自己認証(製造元データ)による]

【包装】

500個/1箱 (50個/1袋, 10袋/1箱)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
株式会社メディカルタウン
東京都文京区本郷3-24-8
電話番号: 03-3816-1381

製造業者
メディコエレクトロースインターナショナル社(インド)
Medico Electrodes International, India